

Antigenní rychlotest určený pro sebetestování.


Postup testování:




1 Otevřete lahvičku s roztokem otočením horního křídélka.




2 Nakapejte celý roztok do zkumavky

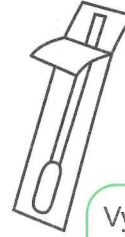


3 Vyměňte výtěrovou tyčinku z balení a nedotýkejte se její špičky!

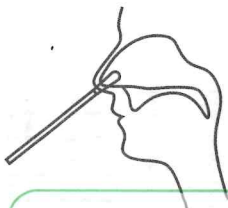


4 Vložte výtěrovou tyčinku do jedné nosní dírky, 1-2 cm hluboko.

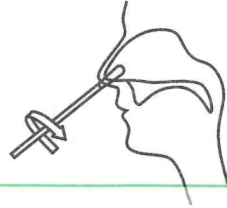

5 Otáčejte s výtěrovou tyčinkou v kruhovém pohybu okolo celé vnitřní strany nosní dírky. Toto zopakujte 5x..

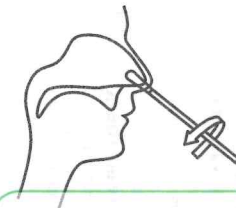

6 Opakujte stejný proces v druhé nosní dírce použitím té samé výtěrové tyčinky.

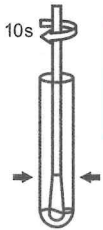

7 Výtěrovou tyčinku vložte do zkumavky s roztokem a 10 vteřin s ní ve zkumavce otáčejte.

8 Zkumavku při vyndávání výtěrové tyčinky stlačte, aby z ní vyteklo co nejvíce tekutiny do zkumavky.

8




9 Na zkumavku nasadte špičku s kapátkem.

9



10 Otevřete sáček s testovací kazetou.

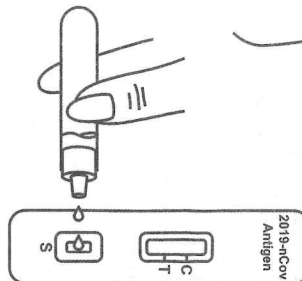


11 Ze zkumavky nakapejte 2 kapky roztoku do jamky testovací kazety.

11



12

Do 20 minut uvidíte výsledek testu.

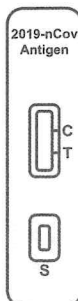


NEGATIVNÍ VÝSLEDEK

Ukáže-li test negativní výsledek, může se testovaný dále účastnit výuky bez omezení.


POZITIVNÍ VÝSLEDEK

Pokud test ukáže pozitivní výsledek, musí být testovaný neprodleně separován v jiné místnosti a veškeré plochy, části nábytku i věci, kterých se testovaný mohl dotýkat, musí být ihned ošetřeny dezinfekčními prostředky.


Interpretace výsledku testu:

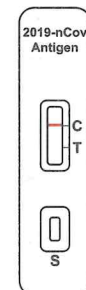

Negativní výsledek

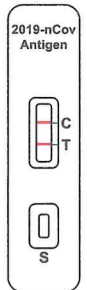

Pozitivní výsledek

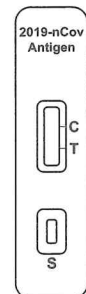

Neplatný výsledek

